


3 TRINN TIL SUKSESS

GUARDIAN™-SENSOR 3

1 START SENSOREN NÅR DAGEN DIN STARTER

Den første dagen må du alltid ha blodsuktermåleren i nærheten. Du kan få flere forespørsler om kalibrering den første dagen.

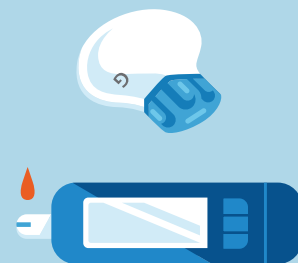

VÆR KLAR TIL KALIBRERING: SENSORENS OPPVARMINGSPERIODE KAN VARIERE FRA 40 MIN TIL OPPTIL 120 MIN



KABLIRER FØR MÅLTID OG SENGETID 2

Kalibrer sensoren med blodsukkerverdien du måler før du setter en måltidsbolus. Kalibrer før sengetid for å unngå varsler om natten.

3 INSTRUKSJONER FOR PUMPEOPPFØLGING

*Varslene BS nødvendig forekommer i automodus.
Varslene Kalibrering nødvendig er for fortsatt visning av sensordata.
Bare husk å lese av og følge pumpens skjermbilder.*



Se baksiden av dette dokumentet for flere tips og triks ►

Medtronic

3 VANLIGE SPØRSMÅL OM GUARDIAN™-SENSOR 3

Spørsmål 1: Når bør jeg kalibrere?

Vi anbefaler at du kalibrerer sensoren med blodsukker verdien du måler før du setter en måltidsbolus og før du går til sengs. Hvis du fordeler sensorkalibreringene utover dagen, vil det bidra til optimal sensorytelse og minimere varslinger. Du kan kalibrere når som helst. Kalibrering med to eller tre trendpiler kan redusere nøyaktigheten frem til neste kalibrering. Vi anbefaler derfor at du kalibrerer når blodsukkeret er stabilt og du ikke ser to eller tre trendpiler på skjermen.

Spørsmål 2: Hvor lenge varer sensoren min?

Selv om sensoren er ment å vare i opptil 168 timer (7 dager), kan det være at du får et varsel som sier Bytt sensor hvis sensoren ikke yter optimalt. Dette er for å sikre at du kun får oppgitt pålitelige og nøyaktige glukoseverdier fra sensoren.

Spørsmål 3: Hva er forskjellen mellom varslene BS nødvendig og Kalibrering nødvendig?

Du får varselet BS nødvendig for å bli værende i eller gå over til automodus. Du får varselet Kalibrering nødvendig for å sikre at du fortsetter å motta nøyaktige og pålitelige sensorverdier. Hvis du får varselet BS nødvendig for å gå over til eller for å fortsette i automodus, og det er på tide å kalibrere, bruker du blodsukker verdien til en kalibrering.

HUSK FØLGENDE: Hvis varselet BS nødvendig oppstår etter at den første blodsukker verdien ble lagt inn, betyr det at den første blodsukker verdien ikke ble godkjent av automodus. Det kan hjelpe å vente i 30 minutter før du måler blodsukkeret på nytt og legger det inn.

Har du flere spørsmål? Kontakt vår kundestøtte på telefon **67 10 32 20**

Se bruksanvisningen for en liste over indikasjoner, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, advarsler og mulige bivirkninger.