

MINIMED™ 670G


HURTIGGUIDE

AUTOMODUS





Denne hurtigguiden beskriver de viktigste funksjonene i MiniMed™ 670G med SmartGuard™ automodus. Er det nødvendig med mer informasjon henvises det til systemets brukerhåndbok.

Låse opp pumpen og sette pumpen i hvilemodus

For å sette pumpen i hvilemodus må du velge og holde inne  til skjermen slukker. Dette kan også spare batteriet.



For å låse opp pumpen må du velge den piltasten på pumpen, som skjermen indikerer at du skal trykke på.

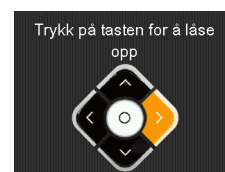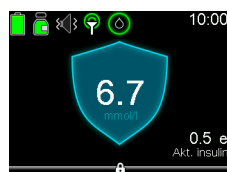


Statusskjermer

I statusskjermene kan du finne informasjon om de seneste hendelser og status, og du vil kunne se meldinger du har mottatt de seneste 24 timene. Her vil du også finne informasjon om status for automodus, og hvorvidt pumpen er klar for SmartGuard™ -automodus, eller om det er nødvendig å gjøre noe.

For å velge statusskjermene: velg  - velg Status.

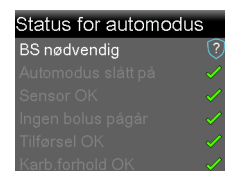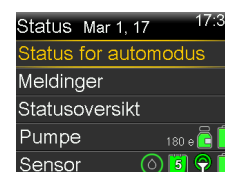

Angi bolus

Velg  - velg Bolus.



Måltidsbolus: angi BS - angi antall karbohydrater.

Korreksjonsbolus: angi BS.

Velg Neste - velg Tilfør bolus.



Stoppe en påbegynt bolus

Etter at bolustilførselen har startet - velg  - velg Stopp bolus - velg  - velg Ja.


Sjekk skjermen Bolus stoppet og legg merke til hvor mye bolus pumpen har tilført. Velg Ferdig.



Angi, og avslutt midlertidig mål

Målet for automodus er 6,7mmol/l. Målet kan endres midlertidig fra 30 minutter til 12 timer. For å midlertidig endre målet til 8,3mmol/l velg **○** – velg Midl. mål og angi varighet med **∨** eller **^** - velg **○** - velg Start.

For å avslutte midlertidig mål velg **○** – Avbryt midl. mål. Detaljene for det midlertidige målet vises. Velg Avbryt midl. mål.

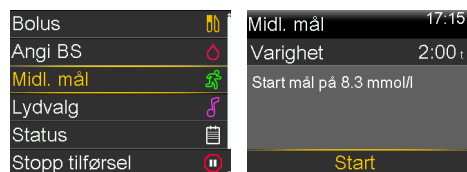

Håndtere varsler og alarmer

Les teksten som vises i skjermen og utfør de handlinger som er nødvendige. Velg **∨** og velg ønsket alternativ ved å trykke på **○**.



Stoppe og gjenoppta tilførselen

Ved midlertidig frakobling av pumpen, bør insulintilførselen stoppes slik at automodus registrerer den faktiske insulinmengden som tilføres.

Stoppe: velg **○** – velg Stoppe tilførsel – velg Ja.


Gjenoppta: velg **○** – velg Gjenoppta basaltilførsel – velg Ja.



Automodus og Sikker basal

Sikker basal tilfører automatisk insulin for å dekke det basale insulinbehovet, basert på det seneste insulinbehovet. Sikker basal justerer ikke tilførselen basert på SG-verdiene. Maksimumstiden pumpen kan være i Sikker basal er 90 minutter, men kan gå tilbake til automodus tidligere, uten at man registrerer dette.

Når pumpen er i Sikker basal, og det er en handling som kan gjøres for å gå tilbake til automodus varsler pumpen om det som er nødvendig å gjøre. Eksempler på dette kan være behovet for en kalibrering, eller en ny BS-verdi, eller å reagere på varselet Tapt sensor.

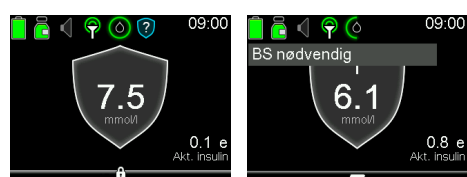

Kalibrering vs. BS nødvendig

Pumpen kan varsle både om kalibrering og BS-nødvendig.

BS nødvendig: pumpen trenger en BS-verdi for å gå inn i, eller for å bli værende i automodus.

Kalibrering nå: er nødvendig for nøyaktige SG-verdier

Følg med på pumpens skjerm og følg pumpens instruksjoner.

