

MINIMED™ 670G


HURTIGGUIDE

MANUELL MODUS





Hurtigguide med informasjon om de viktigste funksjonene i MiniMed™ 670G. Detaljert informasjon finnes i pumpens bruksanvisning.

Låse opp pumpen og sette pumpen i hvilemodus

For å sette pumpen i hvilemodus må du velge og holde inne  til skjermen slukker. Dette kan også spare batteriet.



For å låse opp pumpen må du velge den piltasten på pumpen, som skjermen indikerer at du skal trykke på.

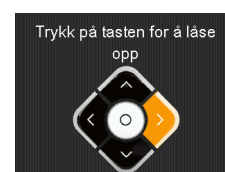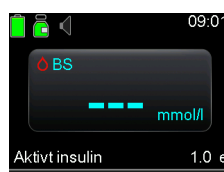


Statusskjermer

Fra statusmenyene kan du finne informasjon om de siste hendelser og status, samt at du vil kunne se varslene som er motatt de siste 24 timene.

For å få tilgang til statusmenyene velg  og velg Status.

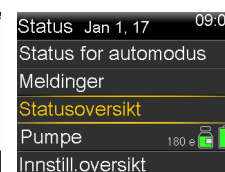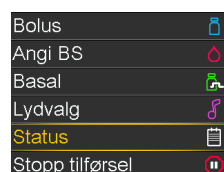



Angi en bolus med Bolus Wizard™

Fra pumpen: Velg  – velg Bolus - velg Bolus Wizard - angi blodsukkeret og angi antall karbohydrater, og velg Neste. Velg Tilfør bolus.


Fra blodsuktermåleren: Slå på blodsuktermåleren - velg Bolus - velg Manuell Bolus eller Forvalgt Bolus.



Stoppe en bolus




Etter at bolusdosen har startet, velg  - velg Stopp bolus, velg  – velg Ja.

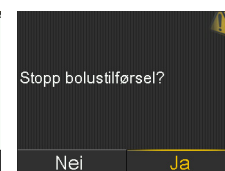Kontroller skjermen Bolus stoppet for å se hvor mye pumpen tilførte. Velg Ferdig.



Midlertidig basal

Denne funksjonen tillater deg å øke eller redusere basaldosen midlertidig i en angitt tid (varighet).

Velg  – Neste – Basal – velg Midl. basal – angi varighet og trykk  – velg neste. Angi prosentandelen av basaldosen og velg  – velg Start.




Avbryte Midlertidig basal

Stopp midlertidig basal ved å velge – velg Avbryt midl. basal. Du vil se informasjon om den midlertidige basaldosen. Velg Avbryt midl. basal.



Håndtere varsler og alarmer

Les teksten som vises i skjermen og utfør de handlinger som er nødvendige. Velg . Velg ønsket alternativ ved å trykke på .

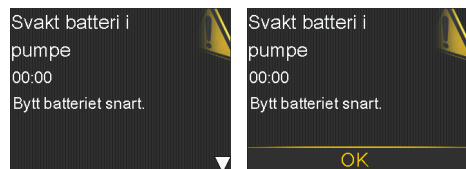


Barnesikring

Blokker pumpen ved å velge – Valg – Verktøy – Barnesikring – sett Barnesikring På og Lagre. Et låssymbol vises i statuslinjen. Pumpens innstillinger kan ikke endres, og bolus kan ikke angis fra pumpen. For å oppheve, velg Valg – Verktøy – Barnesikring – slå funksjonen Av og Lagre.



MiniMed™ SmartGuard™ - automatisk stopp av insulintilførselen

Pumpen stopper insulintilførselen automatisk når systemet forventer at sensorglukosenivået nærmer seg den innstilte grensen for lavt sensorglukosenivå. Pumpen gjenopptar doseringen når sensorglukosenivået trender oppover. (Egne regler gjelder - les bruksanvisningen for detaljer.)

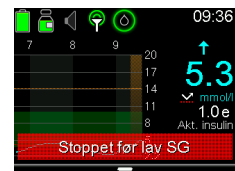


Er det behov for en måltidsbolus og insulintilførselen er stoppet, gjenoppta insulintilførselen manuelt ved å velge Stopp før lavt eller Stopp ved lavt. Følg instruksjonene på skjermen.

- Stopp ved lav eller Stopp før lav er på og klar. Hvis noen av stoppfunksjonene blir aktive, blinker symbolet når insulintilførselen er stoppet.
- Stopp før lav eller Stopp ved lav er på, men utilgjengelig. Dette kan skyldes tidligere stopphendelser eller når ingen SG-verdier er tilgjengelig.

Kalibrering av sensoren

Sensoren bør kalibreres minst to ganger per døgn, men vil be om flere kalibreringer hvis det er nødvendig.

Når varselet Kalibrer nå vises, velg Utsett. Mål blodsukkeret og velg Ja for å bekrefte. Velg Kalibrer sensor og velg Ferdig

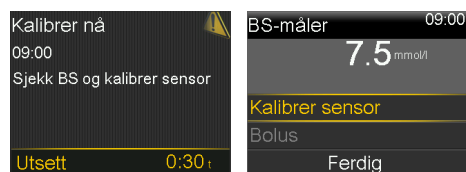

Informasjon på sensorskjermen

