

# MINIMED™ 670G-SYSTEMET – INNSTILLINGER VED OPPSTART

## Behandlers instruksjoner til pasienten når manuell modus brukes – pumpeinnstillinger

Pasientens navn: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Vekt: \_\_\_\_\_ Nåværende behandling: \_\_\_\_\_

Total daglig dose (TDD) før pumpe

Overfør innstillinger fra nåværende pumpe

**ELLER**

Bruk følgende basal- og bolusinnstillinger

### BASALDOSEINNSTILLINGER

| Basalprogram  | Tid                | Dose               | Maks. basal (enheter/time)          |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|               | 00:00 - _____      | _____ enheter/time | _____<br>Standard: 2,0 enheter/time |
|               | _____ - _____      | _____ enheter/time |                                     |
|               | _____ - _____      | _____ enheter/time |                                     |
|               | _____ - _____      | _____ enheter/time |                                     |
|               | _____ - _____      | _____ enheter/time |                                     |
|               | _____ - _____      | _____ enheter/time |                                     |
| _____ - _____ | _____ enheter/time |                    |                                     |

### BOLUSDOSEINNSTILLINGER

| Måltidsbolus  | Karbohydratforhold | Gram/enhet       | Maks. bolus (enheter)         |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
|               | 00:00 - _____      | _____ gram/enhet | _____<br>Standard: 10 enheter |
|               | _____ - _____      | _____ gram/enhet |                               |
|               | _____ - _____      | _____ gram/enhet |                               |
|               | _____ - _____      | _____ gram/enhet |                               |
| _____ - _____ | _____ gram/enhet   |                  |                               |

| Korreksjonsbolus | Insulinsensitivitet |                    | Målområder mmol/l |               | Aktivt insulin-tid (timer)                      |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|
|                  | 00:00 - _____       | _____ mmol/l/enhet | 00:00 - _____     | _____ - _____ | _____<br>2-8 timer i intervaller på 15 minutter |
|                  | _____ - _____       | _____ mmol/l/enhet | _____ - _____     | _____ - _____ |   |
|                  | _____ - _____       | _____ mmol/l/enhet | _____ - _____     | _____ - _____ |   |
|                  | _____ - _____       | _____ mmol/l/enhet | _____ - _____     | _____ - _____ |   |
| _____ - _____    | _____ mmol/l/enhet  | _____ - _____      | _____ - _____     |               |   |

Bolus Wizard™-kalkulator er ikke i bruk for øyeblikket. Innstillingene ovenfor er beregnet basert på:

Nåværende TDD \_\_\_\_\_ enheter. Totalt daglig bolus: \_\_\_\_\_ enheter.

Instruksjoner for insulinbehandling ved overgang til pumpe: \_\_\_\_\_

Disse instruksjonene gjelder i 6 måneder med mindre annet er angitt her: \_\_\_\_\_ måneder.

Behandlerens navn: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Ring diabetesteamet hvis det oppstår episoder med alvorlig lave blodsukkerverdier eller episoder med ketoner. Ring til

Medtronic på telefon 67 10 32 20 for teknisk bistand.

**Medtronic**

# MINIMED™ 670G-SYSTEMET – INNSTILLINGER VED OPPSTART

## Behandlers instruksjoner til pasienten ved manuell modus og automodus

Pasientens navn: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

### MANUELL MODUS – CGM-INNSTILLINGER

| Innstillinger for lav SG   |  |  | Innstillinger for høy SG                                      |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
| Tidssegmenter  | Lav grense   | SmartGuard™-innstillinger  | Tidssegmenter   | Høy grense   | Varselinnstillinger for høy   |
| 00:00 - _____<br>_____- _____<br>_____- _____<br>_____- _____  | 2,8–5,0 mmol/l<br>____ mmol/l<br>____ mmol/l<br>____ mmol/l<br>____ mmol/l | Varsel før lav og Gjenoppta basal er tilgjengelige, men anbefales ikke som rutine.<br><input type="checkbox"/> Stopp før lav*<br><input type="checkbox"/> Stopp før lav*<br><input type="checkbox"/> Stopp før lav*<br><input type="checkbox"/> Stopp før lav* | 00:00 - _____<br>_____- _____<br>_____- _____<br>_____- _____ | ____ mmol/l<br>____ mmol/l<br>____ mmol/l<br>____ mmol/l | Varsel før høy og Stigningsvarsel er tilgjengelige, men anbefales ikke som rutine.<br><input type="checkbox"/> Varsel ved høy SG<br><input type="checkbox"/> Varsel ved høy SG<br><input type="checkbox"/> Varsel ved høy SG<br><input type="checkbox"/> Varsel ved høy SG<br><input type="checkbox"/> Varsel før Høy stilt inn<br><input type="checkbox"/> Stigningsvarsel stilt inn |
| * Stopp før lav vil ikke slå på igjen automatisk hvis pumpen går ut av automodus. Pasienten må aktivere denne innstillingen fra manuell modus. |  |  |   |  |   |
| Utsett lav: _____ min. (5 min. til 1 t. – standard = 20 min.)  |  |  | Utsett høy: _____ min. (5 min. til 3 t. – standard = 1 time)  |  |   |

### SMARTGUARD™-AUTOMODUS – INNSTILLINGER (Justeringer som foretas her, erstatter innstillingene for manuell modus som er angitt ovenfor)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Start automodus den _____ (dato)<br><i>Krever at pumpen har vært i bruk i minimum 48 timer (fra midnatt) før aktivering.</i><br><i>Anbefaling: Det bør gå ≥7 dager mellom Manuell modus og Automodus.</i>  | <b>Karbohydratforhold</b><br><input type="checkbox"/> Bruk nåværende innstillinger         | <b>Aktivt insulin-tid</b><br><input type="checkbox"/> Bruk _____ timer<br><i>Anbefaling: 3–4 timer. Manuell modus Aktivt insulin-tid som er &gt;4 timer bør reduseres til 4 timer ved oppstart av automodus.</i> |
| <b>Automodus BS-varsel:</b> <input type="checkbox"/> På (anbefalt)<br><input type="checkbox"/> Av<br><i>Varsel må være På for å motta et lydvarsel når det kreves et BS for automodus. Hvis det stilles til Av, vises kun et visuelt banner på skjermen.</i> | <b>Karbohydratforhold</b><br>00:00 - _____<br>_____- _____<br>_____- _____<br>_____- _____ | <b>Gram/enhet</b><br>____ gram/enhet<br>____ gram/enhet<br>____ gram/enhet<br>____ gram/enhet  |
|  |  | <b>Varsel ved lav:</b> <input type="checkbox"/> På<br><i>Anbefal På ved 3,8 mmol/l ved oppstart.</i>   |

Disse innstillingene gjelder i 6 måneder med mindre annet er angitt her: \_\_\_\_\_ (Dato)

Kommentarer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Behandlerens navn: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_